




Designed & Manufactured in Munich, Germany

Blood Purification - Next Level

ADVOS BK300

ADVOS multi Verfahren

Individuell abgestimmte Therapie für Patient*innen mit der Indikation für eine Multiorganunterstützung

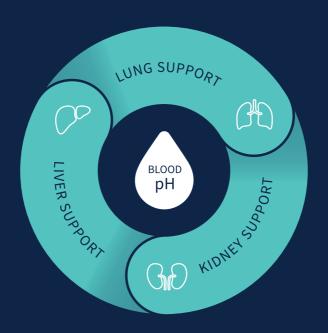

Leber

Entfernung proteingebundener Toxine

Niere

Entfernung wasserlöslicher und proteingebundener Nephrotoxine

Lunge

Flüssigkeitsgestützte CO₂-Entfernung in wenig invasiver Umgebung

Blut pH

Korrektur einer metabolischen und respiratorischen Azidose

Die Sterblichkeitsrate bei Patient*innen im Multiorganversagen steigt mit der Anzahl der versagenden Organe und bleibt weiterhin alarmierend hoch. Diese Patient*innen benötigen eine umfassende extrakorporale Organunterstützung, deren Management auf der Intensivstation äußerst komplex ist und einen erheblichen operativen Aufwand erfordert.

Das ADVOS multi Verfahren ist die weltweit erste Therapie zur individualisierten Multiorganunterstützung.

Die Entgiftungsfunktionen von Niere, Leber und Lunge bei gleichzeitiger effektiver Korrektur von Säure-Basen-Störungen können patientenindividuell mit einem extrakorporalen System unterstützt werden. Das ADVOS-Verfahren verwendet ein mit Humanalbumin angereichertes Dialysat, welches in einem Rezirkulationskreislauf permanent aufbereitet wird.

Die Aufbereitung des Dialysats gewährleistet eine gleichbleibend hohe Entgiftungsleistung proteingebundener und wasserlöslicher Substanzen. Die einzigartige Möglichkeit zur Einstellung des Dialysat-pHs sowie des Bicarbonats ermöglicht einen patientenindividuellen pH-Ausgleich.

Azidosetherapie durch gezielte pH-Steuerung

ab 2025 kodierbar und abrechenbar!




0-000	extrakorporate Leberersatztnerapie [Leberdiatyse]
8-858.0	Bei Indikation zur Leberersatztherapie
8-858.1	$Bei\ Indikation\ zur\ Leberers atztherapie\ und\ zum\ Azidoseausgleich$
	durch gezielte pH-Steuerung

neu 8-858.2 Bei Indikation zum Azidoseausgleich durch gezielte pH-Steuerung

^{*} Krankenhausindividuell zu vereinbaren.

Die nächste Generation ADVOS BK300

Eine neue Ära in der extrakorporalen Blutreinigung

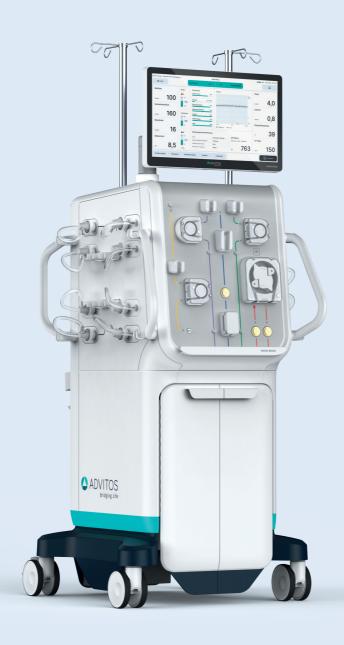

Die neue Generation ADVOS BK300 bietet eine einzigartige Plattform an, die vollintegrierte extrakorporale Blutreinigungstherapien mit einer Behandlungsdauer von bis zu 72 Stunden (RRT - Nierenersatztherapie) ermöglicht.

Die Therapie lässt sich flexibel anpassen: Je nach Parametereinstellung und verwendetem Behandlungsset kann sie gezielt auf ein oder mehrere Leitorgane ausgerichtet bzw. an ein oder mehrere Therapieziele angepasst werden.

Es kann zwischen zwei Therapiemodi gewählt werden:

- 1 ADVOS multi Therapie
 für die Entfernung proteingebundener u
 - für die Entfernung proteingebundener und/oder wasserlöslicher Substanzen, und/oder einer Azidosekorrektur wie z. B. bei Patient*innen im Multiorganversagen, Leberversagen, Intoxikation, schwerem Schock.
- 2 ADVOS RRT für die Basis als Nierenersatztherapie.

Die innovative ADVOS BK300 bietet:

- Ganzheitlichen Therapieansatz für die extrakorporale Blutreinigung
- Individuell steuerbare Clearance für eine gezielte Entgiftung wasserlöslicher und proteingebundener Substanzen
- Einzigartige Azidosetherapie zur gezielten Korrektur von Säure-Basen-Störungen
- Flexible Antikoagulationsoptionen: Möglicheit zur regionalen Citratantikoagulation (RCA) in allen Therapiemodi
- Innovativer Rezirkulationskreislauf: Effektive Blutentgiftung w\u00e4hrend der gesamten Behandlungsdauer durch die kontinuierliche Aufreinigung des rezirkulierenden Dialysats
- Schonendes Verfahren: Gering-invasive Methode mit konventionellem Dialysekatheter und niedrigen Blutflussraten


Einzigartig in dem fluidbasierten Azidosenausgleich

Das ADVOS-Verfahren ermöglicht eine physiologische und fluidbasierte Entfernung von H⁺-Ionen und CO₂ zur Behandlung der metabolischen und respiratorischen Azidose.

Durch die präzise Anpassung des pH-Werts im Dialysat und die frei steuerbare Zugabe von Bicarbonat kann eine Azidose-Therapie optimal auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden. ADVOS BK300 ermöglicht einen flexiblen, skalierbaren Azidosenausgleich durch:

- pH-Steuerung anhand dezidierter
 ADVOS-Konzentrate (Säure und Base)
- Variabel einstellbare Bicarbonatkonzentration während der Therapie



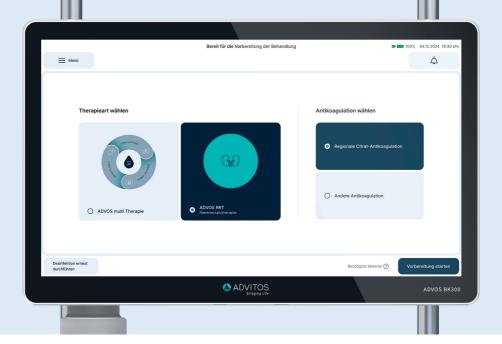

ADVOS RRT: Nierenersatztherapie auf der Intensivstation neu gedacht

Individuell einstellbare Clearance je nach Patientenbedarf und Behandlungsablauf

Dank anpassbarer Einstellungen von Blut-, Dialysat- und Konzentratfluss deckt die ADVOS BK300 mit einem Set-up das komplette Spektrum der Dialysebehandlung einer akuten Nierenschädigung (AKI) ab: von einer intermittierenden Dialyse (iHD, SLED) bis hin zur kontinuierlichen Nierenersatztherapie (CRRT).



Mehr Infos zur ADVOS BK300

Vorteile der ADVOS RRT:

- Regionale Citrat-Antikoagulation (RCA) für alle Dialyseeinstellungen möglich
- Durch freisteuerbare Zugabe vom Bicarbonat kann eine metabolische Alkalose verhindert werden
- Behandlung bis zu 72 Stunden möglich
- Behandlungen über 24 Stunden ohne Fluidwechsel möglich - durch optimierte Konfiguration der Fluide
- Nachhaltige Permeat-Versorgung mit 80 Liter Containerkonzept durch optimiertes Fluidmanagement

Hohe Benutzerfreundlichkeit:


Effizienzsteigerung durch reduzierte Geräteinteraktionen



Optimiertes Flüssigkeitsmanagement

(Permeat/Filtrat-Management)


- **Kompaktes Design:** Integrierter 80 Liter-Container spart Stauraum und reduziert die Notwendigkeit eines Beutelwechsels.
- Effiziente Wasserversorgung: Über die speziell entwickelte Umkehrosmoseanlage ADVOS Aqua wird der Container in weniger als 3 Minuten bei höchstem Hygienestandard befüllt.
- Maximale Flexibilität: Containersystem ermöglicht einen maximal flexiblen Einsatz im Krankenhaus.

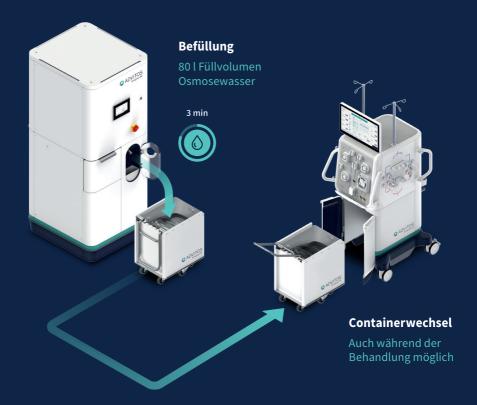



Sichere Blutreinigung

Sichere Dosierung von Medikamenten unter extrakorporaler Therapie gewährleistet

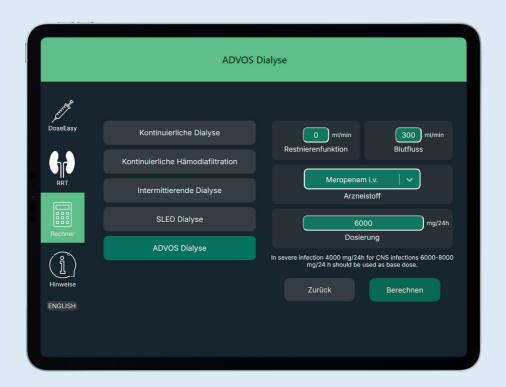

Kalkulation der Medikamentendosierung unter ADVOS-Therapie **jetzt verfügbar im CADDy Rechner**



Calculator to Approximate
Drug-Dosing in Dialysis (CADDy)

https://www.doseeasy.de



Kontakt

ADVITOS GmbH Agnes-Pockels-Bogen 1 80992 München

advos.bk300@advitos.com www.advos-bk300.de



ADVOS connect

Scannen Sie den QR-Code und seien Sie Teil unserer Community auf Siilo!

Das Produkt befindet sich im Konformitätsbewertungsverfahren.